


<b>Instrukcja I-BC/12</b>	<b>Transport materiału do badań laboratoryjnych Kosmówka</b>	
Wydanie 04	Data 21.08.2015	Strona 1 z 1

### 1. Postępowanie z pobranym materiałem

Po pobraniu materiału zgodnie z instrukcją „Pobranie materiału do badań laboratoryjnych Kosmówka” (I-BC/06) jałową próbkę należy przechowywać w temperaturze pokojowej do 25°C.

W przypadku wyższych temperatur zastosować wkłady chłodzące. **UWAGA nie zamrażać !**

### 2. Przygotowanie materiału do transportu

- pobrany materiał do badań należy traktować jako materiał zakaźny,
- szczelnie zamkniętą jałową probówkę (opakowanie pierwotne) należy zabezpieczyć ligniną, watą lub ręcznikiem papierowym i włożyć w szczelny woreczek foliowy (opakowanie pośrednie),
- opakowanie pośrednie umieścić w pozycji pionowej w opakowaniu chroniącym przed zgnieciem (opakowanie zewnętrzne),
- w opakowaniu zewnętrznym należy umieścić zlecenie badania laboratoryjnego,
- na opakowaniu zewnętrznym powinny być umieszczone następujące dane:
  - nadawcy przesyłki,
  - odbiorcy przesyłki,
  - oznaczenie „materiał zakaźny” UN 3373.

### 3. Transport materiału

- przewozić w pozycji pionowej,
- materiał do badań laboratoryjnych powinien być dostarczany do laboratorium przez osoby do tego upoważnione,
- osoba transportująca materiał do badań powinna zostać poinformowana o możliwości zakażenia w przypadku uszkodzenia przesyłki,
- materiał do badań laboratoryjnych powinien być transportowany tak, aby podczas transportu nie zmieniły się jego właściwości, *przewóz w stałej temperaturze od 22°C do 25°C. W przypadku przewozu w temperaturze powyżej 25°C należy zastosować wkłady chłodzące. UWAGA nie zamrażać materiału !*
- do laboratorium NZOZ GENOM pobrany materiał powinien być dostarczony **w tym samym dniu, w którym pobrano kosmki (po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium NZOZ Genom).**
- w przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego podczas transportu i wydostania się materiału zakaźnego, należy go zabezpieczyć w celu zminimalizowania kontaktu z osobami trzecimi, w tym z osobą transportującą, a także poinformować laboratorium NZOZ GENOM o możliwym wymieszaniu się próbek,
- w przypadku gdy istnieje jakakolwiek obawa iż osoba transportująca miała kontakt z materiałem zakaźnym, powinna jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

### 4. Godziny przyjmowania materiału do badań laboratoryjnych.

- materiał do badań należy dostarczyć do laboratorium po wcześniejszym *telefonicznym* uzgodnieniu **terminu tel. kom. 784338650.**
- **kosmówkę należy dostarczyć do laboratorium w dniach od poniedziałku do czwartku do godz. 17.00.**